

Test Catalyst Cortisol

Débloquer les commentaires d'interprétation de résultats spécifiques

Les commentaires d'interprétation fournis avec le test Catalyst* Cortisol vous aident à déterminer la meilleure marche à suivre pour votre patient. Afin de tirer un avantage maximal de ces informations importantes, posez-vous les questions suivantes, puis suivez les étapes décrites ci-dessous :

- ✚ **Analysez-vous plusieurs tests de cortisol pour le même patient ?** Si c'est le cas et que vous avez déjà analysé un test de cortisol initial, suivez la [deuxième](#) partie de l'Étape 1 pour vous assurer que chaque résultat quantitatif est séquentiellement groupé et pour accéder à des [commentaires d'interprétation complets](#).
- ✚ **Avez-vous saisi les informations du protocole ?** Afin de recevoir les commentaires d'interprétation de résultats spécifiques, vous devez sélectionner le bon protocole ainsi que l'étape du protocole pour l'analyse de l'échantillon du patient (voir Étape 2).

Étape 1


Pour un test de cortisol [initial](#), lancez l'analyse sur votre IDEXX VetLab* Station comme vous le faites en temps normal.

OU

Pour les test de cortisol [supplémentaires](#) analysés après un test initial, recherchez l'analyse de cortisol initiale dans le dossier du patient sur l'IDEXX VetLab Station, appuyez sur **Ajouter un test**, puis sur **Joindre résultats**.

Étape 2

À la fin de l'analyse (lorsque vous y êtes invité(e)), sélectionnez le protocole et l'étape de protocole appropriés pour le patient et appuyez sur **Terminé**.

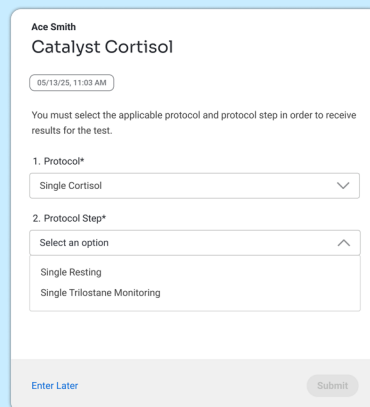


Invitation pour nouveau test Catalyst Cortisol (dans cet exemple, Cortisol unique est sélectionné)

Remarque : Si vous choisissez de saisir les informations ultérieurement, sélectionnez le patient dans la liste En cours sur l'écran d'accueil de l'IDEXX VetLab Station et appuyez sur **Ajouter des détails** à côté de l'icône de l'instrument Catalyst. Puis sélectionnez le protocole et l'étape de protocole appropriés pour le patient et appuyez sur **Terminé**.

Étape 3

Appuyez sur le message dans le coin inférieur gauche de votre IDEXX VetLab Station, indiquant que les résultats du patient sont prêts, et examinez les résultats quantitatifs et les commentaires d'interprétation.

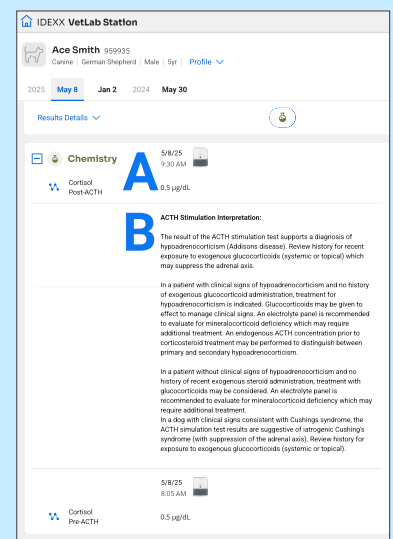

Exemple de résultats quantitatifs d'un test Catalyst Cortisol (A) et de commentaires d'interprétation de résultats spécifiques (B). Lorsqu'un second test est ajouté comme résultat joint à un test de cortisol initial, les résultats sont listés du dernier test secondaire (en haut) au test initial (en bas). Les commentaires d'interprétation complets s'affichent avec les résultats les plus récents.