

Pas d'échantillon d'urine ou fécal? Aucun problème.

Utilisez les codes de test de finalisation d'IDEXX pour soumettre vos échantillons à une date ultérieure.

Cela arrive. Vous passez une commande de test auprès des Laboratoires de référence IDEXX et, pour une raison ou une autre, vous êtes dans l'incapacité d'obtenir l'échantillon requis que vous devez soumettre. Grâce aux codes de test de finalisation IDEXX, vous pouvez soumettre des échantillons pour certains profils de Laboratoires de référence IDEXX pendant les 4 semaines (28 jours) suivant la date de soumission initiale.

Comment utiliser les codes de test de finalisation IDEXX :

Les codes de test de finalisation sont un moyen simple pour vous et votre équipe de vous assurer que votre commande de test des Laboratoires de référence IDEXX puisse être finalisée.

- Confirmez** qu'il s'est écoulé moins de 28 jours depuis l'envoi de la demande de test initiale et que le prénom et le nom du patient correspondent à l'orthographe exacte qui figurait sur la demande de test initiale, afin d'éviter des frais inattendus.
- Commencez** une nouvelle demande de test. Identifiez le code de test de finalisation ci-dessous (ou dans le répertoire des tests en ligne dans VetConnect® PLUS) pour l'échantillon que vous voulez soumettre.
- Soumettez** le nouveau formulaire de commande de test avec votre échantillon et le code de test de finalisation correspondant. La soumission d'une copie du formulaire original de commande de test peut entraîner un retard dans le déroulement du test.

Remarque : Si vous utilisez la trousse de prélèvement à domicile IDEXX FecalChek® pour soumettre un code de test de finalisation de soumission d'un échantillon fécal, vous devez alors soumettre un nouveau formulaire de demande de test. Le nouveau formulaire de demande de test ne doit contenir que le code du test de finalisation fécal et doit accompagner l'échantillon soumis par votre client. Veuillez ne pas soumettre les codes de finalisation d'échantillons fécaux en utilisant une copie du formulaire de demande de test initial sur lequel d'autres tests de laboratoire ont été commandés précédemment, car cela pourrait entraîner un retard dans les tests.

Exemple : Votre commande initiale de test des Laboratoires de référence IDEXX contenait un composant d'analyse d'urine, mais aucun échantillon d'urine n'a été fourni lors de la soumission initiale. Sur une nouvelle demande de test, il suffit d'utiliser le code de test de finalisation UAAC (Urine pour compléter une Analyse d'urine) pour finaliser votre commande. Ce processus facile d'utilisation peut être utilisé jusqu'à quatre semaines après la date de la soumission initiale. Au-delà de quatre semaines (28 jours), utilisez le code de facturation UNA.

CODES DE TEST DE FINALISATION IDEXX		
Code	Nom	Exigences en matière d'échantillons
T4AC	T4, Total Canine/Feline/Equine Completion	1 mL Serum
UAAC	Urine pour compléter une Analyse d'Urine	5 ml d'urine dans un contenant stérile
UAUPCAC	Urine pour compléter une Analyse d'Urine avec Rapport Protéines/Créatinine Urinaire	5 ml d'urine dans un contenant stérile
UPCAC	Urine pour compléter un Rapport Protéines/Créatinine Urinaire	5 ml d'urine dans un contenant stérile
UACBAC	Urine pour compléter une Analyse d'Urine avec Test IDEXX Cystatin B—Canin/Félin	5 ml d'urine dans un contenant stérile
UAPCAC	Urine pour compléter une Analyse d'Urine avec Test IDEXX Cystatin B—Canin/Félin et Rapport Protéines/Créatinine Urinaire	5 ml d'urine dans un contenant stérile
UPCCBAC	Urine pour compléter un Rapport Protéines/Créatinine Urinaire avec Test IDEXX Cystatin B—Canin/Félin	5 ml d'urine dans un contenant stérile
CYSBAC*	Urine pour compléter un Test IDEXX Cystatin B—Canin/Félin	5 ml d'urine dans un contenant stérile
FDXPAC	Échantillon fécal pour compléter un Profil Antigène Fecal Dx ^{MC}	3 à 5 g de selles fraîches dans un contenant de plastique propre
FDXGPAC	Échantillon fécal pour compléter un Profil Antigène Fecal Dx ^{MC} avec <i>Giardia</i>	3 à 5 g de selles fraîches dans un contenant de plastique propre
FDXAC	Échantillon fécal pour compléter un Bilan Antigène Fecal Dx ^{MC}	3 à 5 g de selles fraîches dans un contenant de plastique propre
FDXGAC	Échantillon fécal pour compléter un Bilan Antigène Fecal Dx ^{MC} avec <i>Giardia</i>	3 à 5 g de selles fraîches dans un contenant de plastique propre
FLTAC	Échantillon fécal pour compléter un test (Œufs et Parasites Fécaux (flottaison par centrifugation ZnSO ₄))	3 à 5 g de selles fraîches dans un contenant de plastique propre

Veuillez vérifier que ces codes sont correctement liés dans votre logiciel de gestion de la clinique. Gardez ces informations à portée de main et communiquez-les à l'ensemble de votre équipe.

*Code utilisé pour compléter la partie des profils IDEXX Anywhere qui comprend le test IDEXX Cystatin B.