

Avant de combattre le cancer, vous devez le trouver.

Suivez ces étapes simples pour faire vos premiers pas avec le test IDEXX Cancer Dx^{MC} dès aujourd'hui.

Étape 1

Trouvez vos codes de test IDEXX Cancer Dx.

Prenez en considération vos besoins concernant les tests pour l'aide au diagnostic lorsqu'un lymphome canin est soupçonné et ceux concernant les profils de soins préventifs IDEXX pour les chiens à risque élevé*. Voici trois façons de découvrir quels tests IDEXX Cancer Dx vous conviennent :

- + **Visitez le [site Web VetConnect® PLUS](#) pour accéder en ligne au répertoire des services.**
Vous êtes un nouvel utilisateur? Activez votre compte VetConnect PLUS en appelant au 1-800-667-3411.
- + **Accédez aux [codes de test IDEXX Cancer Dx](#).**
- + **Communiquez avec votre Consultant en diagnostic vétérinaire IDEXX pour discuter des options de tests et des prix.**

Étape 2

Commandez vos tests.

+ **Commandez vos tests à partir de votre logiciel de gestion en clinique d'IDEXX.**

(Cliquez [ici](#) pour consulter les instructions pour configurer les codes de test dans les logiciels [Cornerstone®](#), [Neo®](#), et [ezyVet®](#).)

Pour toutes vos questions concernant les capacités d'intégration du logiciel avec IDEXX, veuillez contacter votre représentant du soutien en clinique*.

+ **Commandez vos tests à partir de VetConnect PLUS.**

C'est la première fois que vous faites cela? Communiquez avec le service à la clientèle des Laboratoires de référence en appelant au 1-800-667-3411.

Étape 3

Envoyez vos échantillons de test aux Laboratoires de référence IDEXX.

- + Si vous envoyez déjà des tests aux Laboratoires de référence IDEXX, suivez les mêmes étapes pour soumettre vos échantillons de test et passez à la 4^e étape.
- + Si vous n'avez encore jamais envoyé de tests aux Laboratoires de référence IDEXX, veuillez communiquer avec votre Consultant en diagnostic vétérinaire d'IDEXX pour en savoir plus sur les options de transport des échantillons.

Étape 4

Consultez les résultats de vos tests.

+ **Sur l'appli mobile ou le [site Web VetConnect PLUS](#).**

Pour télécharger l'appli mobile VetConnect PLUS, balayez l'un des codes QR ci-dessous.



 App Store



 Google Play

+ **Logiciel de gestion en clinique intégré.**

Vous souhaitez discuter de vos résultats avec un vétérinaire d'IDEXX? Communiquez avec les services de consultation médicale au 1-800-667-3411.


Étape 5

Éduquez vos propriétaires d'animaux.

Les gens ne veulent pas avoir à penser au cancer de leur animal. Nous avons donc créé un éventail de ressources pour aider votre personnel à communiquer efficacement et avec compassion au sujet des différentes options proposées aux propriétaires d'animaux.



Téléchargez le vôtre ici

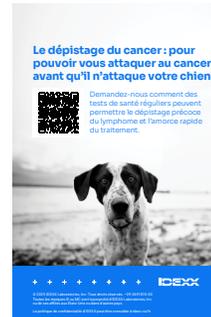

Ressources

- + Visitez le site idexx.ca/fr/CancerDx pour en apprendre plus sur le test IDEXX Cancer Dx^{MC}.
- + Accédez à notre sélection de ressources éducatives dans le [Centre d'apprentissage IDEXX](#), y compris des webinaires, des nouvelles, des liens vers des ressources de l'industrie, et encore plus.
- + Consultez [l'algorithme du test IDEXX Cancer Dx](#) pour obtenir des conseils sur l'interprétation des résultats et sur les prochaines étapes.
- + Configurez vos nouveaux codes de test dans les logiciels [Cornerstone®](#), [Neo®](#), et [ezyVet®](#).
- + Accédez à des [outils pour la communication avec les propriétaires d'animaux](#) pour vous aider à discuter avec vos clients.
- + Connectez-vous à votre compte [MyIDEXX](#), ou créez-en un, pour accéder facilement à des outils et à des informations pour gérer votre entreprise.

Communiquez avec votre Consultant diagnostic vétérinaire pour toutes vos questions concernant le test IDEXX Cancer Dx ou pour planifier une formation pour votre équipe.

Services de consultation médicale IDEXX et le service à la clientèle des Laboratoires de référence : 1-800-667-3411

* Les chiens à risque élevé comprennent les chiens de 7 ans ou plus et les chiens de race à risque élevé de 4 ans ou plus.
† Pour les PIMS autres qu'IDEXX, communiquez avec l'équipe de soutien de votre PIMS directement.

© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2691902-00
Toutes les marques ® ou MC sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d'autres pays.
La politique de confidentialité d'IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.

