

Foire aux questions

Qu'est-ce que le test SNAP[®] cPL^{MC}?

Le test SNAP[®] cPL^{MC} est un test in vitro pour déterminer les niveaux de lipase pancréatique (cPL) dans le sérum canin.

Comment dois-je interpréter un résultat de test SNAP[®] cPL^{MC}?

• Niveau normal

Si la couleur de la pastille de l'échantillon est plus claire que la couleur de la pastille de référence, les niveaux cPL sont normaux.

• Niveau anormal

Si la couleur de la pastille de l'échantillon est la même ou plus foncée que la couleur de la pastille de référence, les niveaux cPL sont anormaux.

Quels types d'échantillons peuvent être utilisés pour le test SNAP cPL?

Du sérum frais ou conservé entre 2 à 8 °C jusqu'à une semaine peut être utilisé.

Combien de gouttes d'échantillon et de gouttes de conjugué ai-je besoin pour exécuter le test SNAP cPL?

Le test SNAP cPL nécessite 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

J'ai utilisé un mauvais ratio de conjugué/échantillon. Puis-je me fier aux résultats obtenus?

Nous vous recommandons de recommencer le test avec le bon ratio de conjugué/échantillon figurant dans la notice, c'est-à-dire 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

Quel est le temps de lecture pour le test SNAP cPL et est-ce vraiment important?

Le résultat du test doit être lu 10 minutes après l'activation de l'appareil. Le test ne contient pas de solution d'arrêt, et après 10 minutes, une coloration non liée à l'échantillon peut se produire. Ne pas rapporter les résultats lus après 10 minutes.

Comment les composants de la trousse doivent-ils être stockés?

- Conserver entre 2 et 8 °C jusqu'à la date de péremption.
- Tous les composants doivent être à température ambiante (de 18 à 25 °C) avant d'exécuter le test. Ne pas chauffer.

Mon test SNAP cPL a été hors de l'emballage en aluminium toute la journée. Puis-je toujours l'utiliser?

Le test SNAP cPL, et tout autre test SNAP[®], doit être utilisé dans les 2 heures après avoir été retiré de l'emballage en aluminium.

Est-ce que mon analyseur SNAPshot Dx[®] peut lire le test SNAP cPL?

Oui, l'analyseur SNAPshot Dx peut lire le test SNAP cPL.

Est-ce que le test SNAP cPL peut être utilisé avec l'appareil mobile SNAP Pro[®]?

Oui, le test SNAP cPL peut être utilisé avec l'appareil mobile SNAP Pro.