

## Directives relatives au cyclage des trousse de test SNAP®

Les directives relatives au cyclage des trousse de test SNAP® varient. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer les directives relatives au cyclage correspondant à vos trousse de test SNAP.

**Remarque :** Le cyclage est le processus par lequel un produit est retiré du réfrigérateur afin qu'il s'équilibre à la température ambiante pendant une période de 30 minutes à 8 heures, avant d'être remis au réfrigérateur.

**IMPORTANT : Au moment du cyclage, conservez les tests SNAP dans leur emballage en aluminium et le conjugué dans son flacon.**

Pour en savoir plus sur votre trousse de test SNAP, y compris sur les températures d'entreposage appropriées et sur la manière d'obtenir un rendement optimal, consultez la notice de la trousse du test SNAP.

Test SNAP	Directives relatives au cyclage
SNAP® 4Dx® Plus†	
SNAP® cPL <sup>MC</sup>	
SNAP® Feline proBNP	
SNAP® FeLV	Chaque test SNAP et chaque flacon de conjugué peuvent faire l'objet d'un cyclage jusqu'à 30 fois.
SNAP® FIV/FeLV Combo	
SNAP® fPL <sup>MC</sup>	
SNAP® <i>Giardia</i>	
SNAP® Lepto‡	
SNAP® Parvo†	
SNAP® Acides Biliaires	Chaque test SNAP et chaque flacon de conjugué peuvent faire l'objet de 5 cyclages au maximum. Le dispositif et le conjugué doivent être réchauffés 30 minutes avant leur utilisation.
SNAP® Cortisol	Chaque test SNAP peut faire l'objet de 5 cyclages au maximum. Le conjugué ne peut pas faire l'objet d'un cyclage; il doit être conservé au réfrigérateur et utilisé froid.
SNAP® T <sub>4</sub> (à utiliser avec le lecteur SNAP®)	Chaque test SNAP et chaque flacon de conjugué peuvent faire l'objet de 5 cyclages au maximum. <b>Remarque :</b> Le conjugué peut être utilisé froid et ne requiert aucun cyclage thermique.
SNAP® Total T <sub>4</sub> (à utiliser avec l'analyseur SNAPshot Dx®)	Chaque test SNAP et chaque flacon de conjugué peuvent faire l'objet de 15 cyclages au maximum. <b>Remarque :</b> Le conjugué peut être utilisé froid et ne requiert aucun cyclage.

†Ces tests peuvent être entreposés à température ambiante, ce qui élimine la nécessité du cyclage. Consultez la notice de la trousse de test SNAP ou le site idexx.ca/fr pour en savoir plus.

‡Disponible en 2016.