

Nettoyage de l'Analyseur SNAP Pro*

Pour nettoyer les pièces internes (à effectuer chaque semaine ou selon les besoins)



1. Éteignez l'analyseur et débranchez le cordon d'alimentation et/ou le cordon Ethernet.




2. Sur la base de l'analyseur éteint, utilisez un tournevis à embout plat ou une pièce de monnaie pour tourner les 2 attaches argentées d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



3. Enlevez la base de l'analyseur.



4. Nettoyez la base **tout entière** avec une lingette non pelucheuse ou un cure-oreille imbibé d'alcool isopropylique à 70 %, d'eau et de savon liquide doux ou de solution à 10 % d'eau de javel.

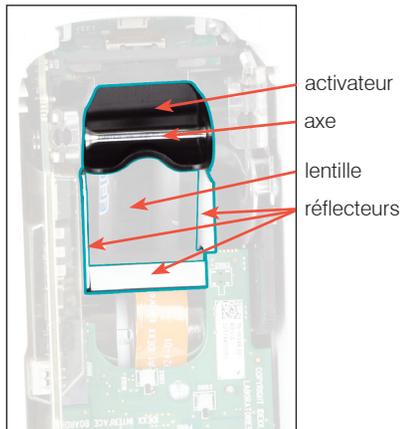

5. Nettoyez les 3 réflecteurs blancs, l'axe et l'activateur avec une nouvelle lingette non pelucheuse ou un nouveau cure-oreille imbibé d'alcool isopropylique à 70 %, d'eau et de savon liquide doux ou de solution à 10 % d'eau de javel. **NE NETTOYEZ PAS la lentille.**



6. Dès que la base est sèche, fixez-la à nouveau sur l'analyseur et vérifiez qu'elle est bien enclenchée.



7. Tournez les attaches argentées d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien les verrouiller.



8. Assurez-vous que la base et les attaches argentées sont à niveau avec l'analyseur et qu'elles sont bien verrouillées. **Le fait de ne pas bien verrouiller la base et les attaches risque de nuire à la performance de l'analyseur.**

Pour nettoyer le boîtier et l'écran (à effectuer selon les besoins)



Nettoyez le boîtier et l'écran avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique à 70 %, d'eau et de savon liquide doux ou de solution à 10 % d'eau de javel.

N'ESSUYEZ PAS les événements situés sous le bouton d'alimentation ou les orifices pour branchement et les ports USB/Ethernet.

Durant le nettoyage, n'exposez pas l'analyseur aux produits suivants :

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| X Solvants organiques | X Insecticides |
| X Produits nettoyants à base d'ammoniac | X Désinfectant |
| X Stylos-feutres | X Produits cirants |
| X Vaporisateurs contenant des liquides volatils | X Désodorisants |