


# Directives pour la livraison d'échantillons aux Laboratoires de référence IDEXX par Purolator

## Emballage des échantillons

### 1. Étiqueter les échantillons correctement (image 1).

- Veuillez identifier chaque échantillon avec :
  - Le nom du patient et le nom de famille du propriétaire
  - La date
  - Le type d'échantillon
- Veuillez écrire clairement et lisiblement; plus l'écriture est lisible, moins il y a de risque d'erreur.
- Si vous étiquetez l'échantillon :
  - Ne collez pas l'étiquette sur le couvercle ou le bouchon.
  - N'enroulez pas l'étiquette autour du tube.
  - Ne laissez pas une partie de l'étiquette dépasser ou pendre du tube.
  - Veillez à ce que l'étiquette ne cache pas le contenu du tube.
- N'utilisez pas l'étiquette pour sceller le tube.


Image 1

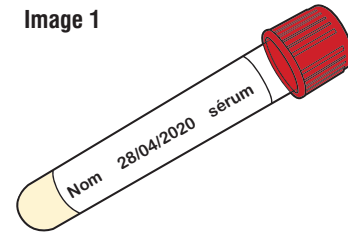


### 2. Inclure un formulaire de réquisition.

- Pliez le formulaire en quatre, tel qu'illustré à l'image 2.  
**IMPORTANT** : Placez le formulaire dans la pochette arrière du sac d'échantillons, code à barres vers l'extérieur.

Image 2

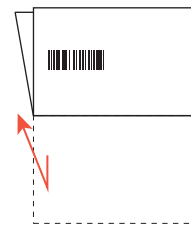

Pliez le formulaire en deux le long de la ligne horizontale, afin que le code à barres reste visible.

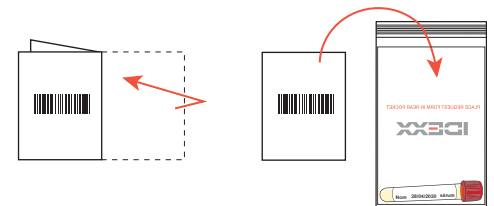


Pliez-le une nouvelle fois à la verticale, en vous assurant toujours que le code à barres reste visible.

Placez le formulaire dans la pochette du sac d'échantillons, **code à barres vers l'extérieur**.

### 3. Emballage des échantillons (image 3).

- Placez les échantillons dans le sac prévu à cet effet (échantillons d'un seul patient par sac).
- Placez le sac d'échantillons scellé dans une boîte de livraison IDEXX-Direct® (chaque boîte peut contenir plusieurs sacs d'échantillons).
- Placez dans la boîte un sachet réfrigérant emballé séparément dans un sac scellé.  
**IMPORTANT** : **Isolez** les sachets réfrigérants des sacs d'échantillons (ne mettez **pas** les sachets réfrigérants dans le sac d'échantillons et ne mettez **aucun** échantillon dans le sachet réfrigérant).
- N'ajoutez aucun matériel d'emballage (billes de polystyrène, papier journal ou papier à bulles).

Image 3

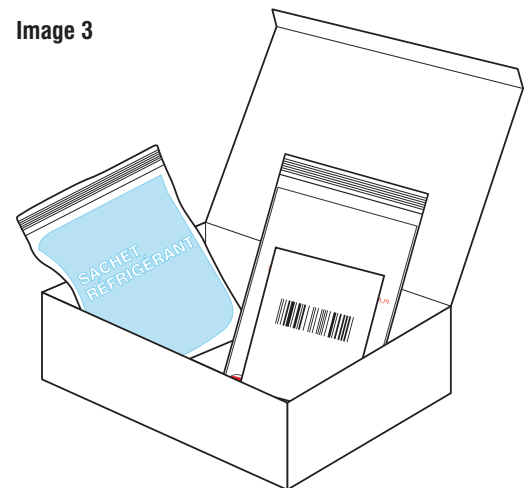

Besoin de boîtes ou de sacs d'échantillons?  
Téléphonez à IDEXX au **1 866 683-2551**.

# Envoi des échantillons avec Purolator

- 1. Emballez les échantillons** – Placez la boîte d'expédition IDEXX-Direct® dans le sac Purolator Express<sup>MD</sup> Pack (image 4) et scellez-le.
- 2. Adresse** – Apposez sur la surface de votre colis un connaissance préimprimé de Purolator.
- 3. Faire une demande de cueillette** – Rendez-vous au site Web [purolator.com](http://purolator.com) ou composez le **1 888 SHIP-123 (1 888 744-7123)**.

Image 4



## Suivi du colis

Rendez-vous sur [purolator.com](http://purolator.com) et saisissez votre numéro de suivi dans le champ **Suivre un envoi**, ou encore téléphonez au **1 888 744-7123**.